

Yeni Kolay ve Yüksek Konforlu Nefes Özelliği EXR Premium

EXR Premium, hastanın solunum döngüsünde, nefes verirken basıncı düşürerek solunum eforunu azaltır. Cihaz, hasta nefes verme döngüsüne geçtiği anda hızlı bir miktar basıncı azaltır (Şekil 1.deki "a" parametresi) ve bunun ardından nefes eğrisini taklit ederek solunum döngüsünü tamamlar.

EXR Premium'un oluşturduğu bu nefes eğrisi yüksek konfor ve yüksek uyum sağlar.

Hastalar daha konforlu ve mutlu, doktorlar ise hastaların artan uyumundan dolayı daha mutlu. Herkes için daha başarılı bir tedavi.



EXR Premium hızlı düşüş miktarı Yüzde olarak ayarlanabilir (Şekil 1.deki "a" parametresi). EXR Premium toplam düşüş miktarı da 3 kademede ayarlanır (Şekil 2.deki "b" parametresi). İstenirse kapatılabilir. Her kademe yaklaşık 1 cm H₂O'ya denk gelir. SleepOne AutoCpap cihazında standard olarak sunulmaktadır.

SLEEP ONE AUTO PAP

EXR PREMIUM

SleepOne CPAP ailesi CPAP ve otomatik basınç ayarlı Auto CPAP cihazlarından oluşur. Her iki cihazda makul fiyat etiketleriyle çok amaçlı, sessiz ve iyi performans sağlayıcıdır. Yüksek fiyatlı aksesuarları unutun! Etkili bir tedavi için yüksek fiyatlar ödemenize gerek yok. Uyku datanızı almak için ödeme yapmanıza gerek yok. Tamamı bu küçük ve dayanıklı makinenin içindedir. Rahat bir gece uykusu için ihtiyacınız olan her şey. Data kilitleme fonksiyonu sürekli doğru tedaviyi almanızı sağlar. SleepOne Software içeren paketi sayesinde, raporlarınızı sadece USB kablosu ile alabilirsiniz. AutoPAP ve ya standart cihazdan hangisini kullanıyor olursanız olun, gece raporları SleepOne Software yardımıyla cihazdan alınabilir. Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve yatak odasında karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için yeterlidir. İhtiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Oksijen zenginleştirme adaptörü, otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için İZV jak dönüştürücü...

SleepOne AutoPAP cihazı olabilecek en düşük tedavi basıncı ile konforlu bir tedaviyi mümkün kılar. Bunu cihazın dahili algoritması sağlar. Auto-On ve Auto-Off fonksiyonları, eğer tedarikçi, hasta ile ilgili bir sorun yaşarsa, durdurulabilir ve kilitlenebilir. SleepOne cihazları hastaya konfor, güven ve maddi kolaylık sağlar.

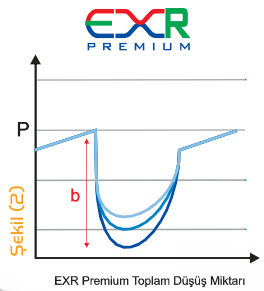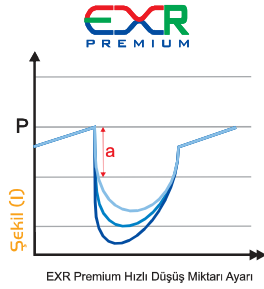

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Aralığı(cmH ₂ O)	3-20cm H ₂ O (0.5 artış)
Akış	0 cm H ₂ O 180 lt/dk 20cm H ₂ O >50 lt/dk
İrtifa Ayarı	Otomatik
Ölçüler	18.1 x 15.5 x 11.7 cm
Ağırlık	1.28 kg
Güç Tüketimi	65 W
Voltaj	100-230 V AC
Garanti	2 Yıl
Gürültü Seviyesi	<29 dB
Raporlama Yazılımı	SleepOne Software
Auto-On / Auto-Off	Var
Mask Off	Var
Ayarlanabilir Parametreler	Rampa Süresi, Rampa Başlangıç Basıncı, Auto-On, Auto-Off, CPAP Maske Kaçak Alarmı, Tedavi basıncı

